

TopDap®

Sichere und standfeste Dappengefäße



Ihre Vorteile im Überblick:

TopDap® System für Flüssigkeit, Pulver und Hilfsteile

- System zum Anmischen und zur Bereithaltung von Kleinmaterialien
- absolut standsicher, komplett wiederverwendbar und sterilisierbar
- austauschbare Einsätze aus hochfestem Kunststoff
- komfortabler Pinselhalter, in 2 wählbaren Positionen anwendbar
- Systemträger für 3 Dappenbehälter und Pinselhalter aus Edelstahl und Aluminium

Verarbeitungsanleitung

TopDap®

Die Si-tec GmbH stellt Ihnen hier einen weiteren sehr nützlichen Helfer für den täglichen Gebrauch in Praxis und Labor vor, das TopDap® System.

DAS PROBLEM

Kleine aber kostbare Materialmengen werden häufig in kleinen und damit leichten Gefäßen vorgehalten. Viele Techniker und Behandler haben sicherlich schon oft die unangenehme Erfahrung mit umgekippten Dosen und Gefäßen beim Zugriff auf die dort enthaltenen Materialien gemacht. Aus den eigenen leidvollen Erfahrungen heraus entstand der Wunsch, ein eigenes Gefäßsystem zu entwickeln, mit dem die tägliche Arbeit komfortabler, nervenschonend und zugleich kostensparend bewältigt werden kann.

DIE LÖSUNG

TopDap®! In dem Starterset enthalten sind 3 Dappen-Gefäße für Flüssigkeiten, Pulver und Hilfsteile sowie ein sehr komfortabel in der Hand liegender Pinselhalter, die in einem Systemständer kombiniert und einzeln entnehmbar sind. Die 3 Gefäße bestehen aus dem Dappenbehälter, dem austauschbaren Dappeneinsatz zur Aufnahme einer Dappen-Schiene sowie dem Dappendeckel.

Der Systemträger ist aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung und die Dappenbehälter mit Deckel und der Pinselhalter sind aus einer gleichwertigen und sehr schweren Edelstahllegierung gefertigt. Die Komponenten sind von ansprechender Optik in gebürsteter Metalloberfläche und hygienisch sterilisierbar. Der auswechselbare Dappeneinsatz zur Aufnahme kleiner Flüssigkeits- oder Pulvermengen besteht aus einem chemisch widerstandsfähigen und stabilen Kunststoff.

Aufgrund der hochdichten Oberfläche des Dappenkunststoffes läßt sich auch ausgehärteter Autopolimerisat-Modellierkunststoff leicht entfernen. Die auswechselbaren und massiven Dappeneinsätze sind für den Einzelgebrauch konzipiert, aber auch für den Mehrfachgebrauch geeignet und sterilisierbar/autoklavierbar bei 134 Grad Celsius. Bei unbeschädigter Oberfläche des Kunststoffes sind bis zu 150 Sterilisierungszyklen zu erreichen.

Der Mehrfachgebrauch bewirkt nicht nur eine Kostenersparnis für Praxis und Labor, sondern ist auch ein Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz. Durch das Design und die schwere Edelstahlqualität sind die Dappenbehälter absolut standfest und ermöglichen ein sicheres Handling der eingebrachten Materialien im Systemträger aber auch im Einzelgefäß.

Ein Dappenbehälter mit Einsatz und Deckel wiegt satte 120gr ! Ein Umstoßen und Verschütten der kostbaren Arbeitsmaterialien wird in der üblichen Anwendungsweise sicher vermieden. Der im Set enthaltene Pinselhalter liegt sehr angenehm und sicher in der Hand. Konfektionierte austauschbare Pinselspitzen können in 2 wählbaren Positionen angebracht werden.

Mit dem TopDap® ermöglicht die Si-tec GmbH einen weiteren Schritt in einen sicheren und effizienten Arbeitstag.

Si-tec – sinnvolle Technik

Best.Nr.

TopDap®	
Starterset	5010
Dappen-Schiene	5005
Pinselhalter	5003
Dappenbehälter	5007
Dappeneinsatz	5002
Pinseleinsatz, 50 Stück	5006
Mikro Applikatoren bunt gemischt, 100 Stück	5015