

TK-Soft und TK-Soft mini

Feinjustierbare Friktionselemente für alle parallelwandigen Dentalkonstruktionen

TK-Soft



TK-Soft mini




Ihre Vorteile im Überblick:

- Ausreißsichere Titanverschraubung
- Feinjustierbare Friktionseinstellung
- mit allen in der Dentaltechnik üblichen Materialien zu verarbeiten
- in Abhebetchnik und Einstückgusstechnik anwendbar
- ideal bei Neuanfertigungen von Sekundärkonstruktionen
- selbstsichernd durch Dübeleffekt ohne Verklebung

Verarbeitungsanleitung

TK-Soft und TK-Soft mini

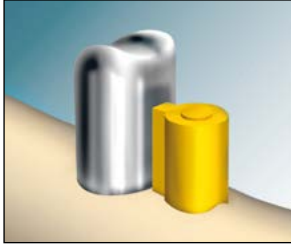


►1

An die fertig gefräste Primärteleskopkrone wird der TK-Soft Platzhalter mit Wachs oder Kleber fixiert.




Beim TK-Soft mini muß die schmale Seite des Platzhalters an der Primärkrone fixiert werden.

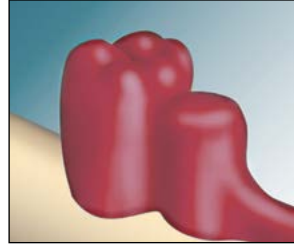

►2


Abhebeteknik

Bei Anwendung der Abhebeteknik wird die Sekundärteleskopkrone aus Modellierkunststoff hergestellt und der Platzhalter dabei einmodelliert. Der Platzhalter muß dabei nicht isoliert werden, da er sich nicht mit dem Modellierkunststoff verbindet.

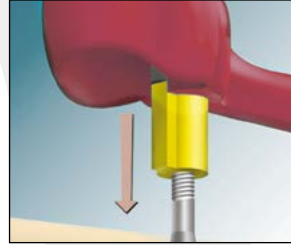

►3

Der Platzhalterentferner wird in den Platzhalter eingedreht und dieser nach basal aus der modellierten Krone herausgezogen. Da durch das Eindrehen des Platzhalterentferners die Platzhalter deformiert werden, sind die Platzhalter nur einmal verwendbar. Die Platzhalter sind aus mundbeständigem Kunststoff gefertigt und können auch als inaktiver temporärer Verschuß der Aufnahmekanäle eingesetzt werden.

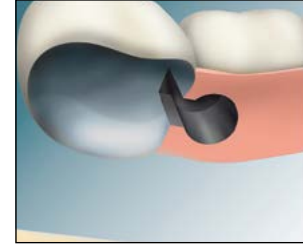


►4

Der Modellguss wird ohne Berücksichtigung des TK-Soft / TK-Soft mini Friktionselementes ausgearbeitet. Die Passung des Aufnahmekanals für das Friktionselement kann mit Hilfe des entsprechenden Platzhalters überprüft werden, da dieser exakt die gleiche Bemaßung hat wie die Friktionselemente TK-Soft und TK-Soft mini. Den Aufnahmekanal bei Bedarf vorsichtig nacharbeiten bis eine friktive Passung entsteht.

TK-Soft und TK-Soft mini


Best.Nr.

TK-Soft Starterset 6x Friktionselemente 6x Platzhalter 1x Platzhalterentferner 1x Aktivierinstrument 1x Einbringhilfe	2000
TK-Soft Nachfüllpack 6x Friktionselemente 6x Platzhalter	2010
Einzelteile Friktionselement Platzhalter Platzhalterentferner Einbringhilfe TK-Soft Aktivierinstrument	2001 2005 2022 2023 2024
TK-Soft mini Starterset 6x Friktionselemente 6x Platzhalter 1x Platzhalterentferner 1x Aktivierinstrument 1x Einbringhilfe	2100
TK-Soft mini Nachfüllpack 6x Friktionselemente 6x Platzhalter	2110
Einzelteile Friktionselement Platzhalter Platzhalterentferner Einbringhilfe TK-Soft mini Aktivierinstrument	2101 2105 2022 2123 2024

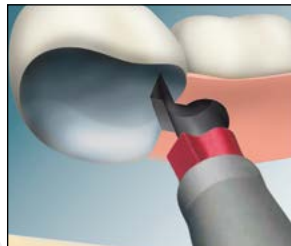


►5

Erst nach der Fertigstellung wird das Friktionselement mit der Einbringhilfe in den Aufnahmekanal eingebracht. Dazu wird es mit der Schraubenkopf-Seite in der Einbringhilfe positioniert, in den Aufnahmekanal eingeschoben und mit der Gegenseite der Einbringhilfe in die Endposition gebracht. Die Friktionselemente sind selbstsichernd durch ihren Dübeleffekt und werden nicht eingeklebt.

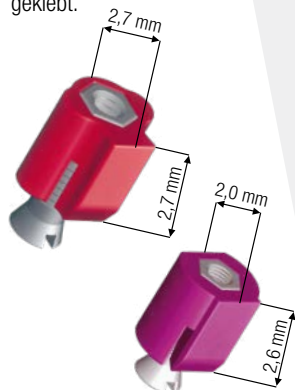

►6

Bei Bedarf kann durch leichtes Drehen der Aktivierschraube die Friktion des Teleskopes individuell eingestellt werden.

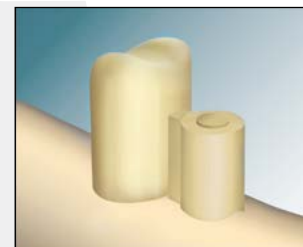

►7

Einstückgusstechnik

Bei Anwendung der Einstückgusstechnik wird der Platzhalter im basalen Bereich ausgeblockt und das Modell zum Dublieren vorbereitet. Auf dem Duplikatmodell aus Einbettmasse kann nun die Krone mit dem Modellguss zusammen modelliert werden.